



Personenbeförderung (KMP) –
viel Platz für individuelle Ansprüche.

Mobilität bedeutet Freiheit – mit einem Auto nach Maß.

Wir unterstützen und beraten Sie gerne.

KIRCHHOFF Mobility ist seit über drei Jahrzehnten als unabhängiger Fahrzeugumrüster für vielseitige, bedienerfreundliche und angepasste Mobilitätshilfen in Serienfahrzeugen tätig. Unsere Kunden sind Personen, die ein Kraftfahrzeug krankheits-, alters- oder unfallbedingt nur eingeschränkt nutzen können.

Vom einfachen Drehknopf für das Lenkrad bis hin zu komplexen Karosseriearbeiten. Wir kümmern uns um alles und bieten Ihnen einen Rundum-Service mit einem persönlichen Ansprechpartner. Auch bei Fragen zu Förderung, Führerschein oder Finanzierung können wir Sie unterstützen.

Unsere Produktbereiche



Fahr- und
Bedienhilfen



Einstieghilfen



Verladehilfen



Liftsysteme



Heckeinsteiger



Personen-
beförderung (KMP)



Spezial-Sitze
& Gurte



Sonder- und
Spezialfahrzeuge



Standheizungen



Miet- und Werkstatt-
ersatzfahrzeuge



Personenbeförderung (KMP)



Kraftfahrzeuge zur Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen

Alusystemboden 04



Sitze für Personenbeförderung ... 06

RolliBox. 08

Trittstufen 10

Rollstuhlhaltesysteme..... 12



Auffahrrampen..... 14

Auffahrschienen..... 16

Hebebühnen Linear..... 18

Schwenklift..... 20



Unqualifizierter
Krankentransport 22



Alusystemboden

Auf einen Blick

- ✓ Variabler, kombinierter Transport von Fahrgästen mit und ohne Rollstuhl
- ✓ Für alle gängigen leichten Nutzfahrzeuge
- ✓ Wählen Sie zwischen verschiedenen Transport- und Sitzvarianten
- ✓ Einfaches Klicksystem

Der Alusystemboden bietet durch das einfache Klicksystem maximale Flexibilität bei der Bestuhlung Ihres Fahrzeuges. Ob Sitze, Liegen oder Rollstuhlhaltesysteme, das Raster schienensystem ermöglicht Ihnen die individuelle Zusammensetzung und Platzierung der Bestuhlung und weitere Sicherheitsfeatures.

Der Alusystemboden ist je nach Fahrzeug und Bedarf mit verschiedenen Schienenlängen und Anzahl erhältlich. Es kann zwischen verschiedenen Bodenbelägen gewählt werden.



Personenbeförderung



Gestalten Sie den Innenraum nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen!



Sitze zur Personenbeförderung

Auf einen Blick

- ✓ Große Auswahl verschiedener Modelle
- ✓ Große Auswahl verschiedener Farben und Muster
- ✓ Teils OEM- Bezüge verfügbar

Sie haben die Auswahl zwischen fest auf Füßen montierten Sitzen, Drehsitzen und Klappsitzen. Mit den Dreh- und Klappsitzen können Sie jederzeit zwischen einem normalen Sitzplatz und einem Rollstuhlfahrerplatz wählen. Mit einer einfachen Verriegelung können Sie die Position Ihrer Sitze selber bestimmen, jederzeit wieder ändern oder ganze Sitze einfach herausnehmen.



Jany 805



Linea



SICOM 2



Jany 805



Taf



SL3

Bezug und Farbe lassen sich bei vielen Modellen individuell anpassen.

Die Sitze können wir im Rahmen der Herstellervorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen so einbauen, wie Sie es für die optimale Nutzung Ihres Fahrzeuges benötigen.



M1



RolliBox

Auf einen Blick

- ✓ Kombiniertes Transport von Fahrgästen mit und ohne Rollstuhl
- ✓ Variable Beförderungsmöglichkeiten
- ✓ Schneller und komfortabler als Standardsystem
- ✓ Kopfstütze und Rückenlehne für Rollstuhlfahrer

Das RolliBox System vereint den normalen Personentransport mit dem Transport von Rollstuhlfahrern. Dabei bietet es hohe Flexibilität bei optimaler Raumausnutzung.

Für die Mitnahme eines Fahrgastes im Rollstuhl werden aus der Box Tragarme ausgeklappt, an denen Rollstuhl-Rückhaltgurte befestigt sind. Die anpassbare Kopfstütze und der Drei-Punkt-Sicherheitsgurt gewährleisten höchste Sicherheit.



Personenbeförderung



Wird die RolliBox nicht benötigt, können die ergonomischen Klappsitze genutzt werden. Diese sind, wie auch die Kopfstützen, auf Rasterschienen an der Fahrzeugwand befestigt. Hierdurch können Sie je nach Bedarf verschoben werden.



Trittstufen

Auf einen Blick

- ✓ Sicherer Ein- und Ausstieg
- ✓ Unterschiedliche Größen und Ausführungen
- ✓ Optional zusätzliche Handgriffe an der Seitentür
- ✓ Einfache Handhabung

Wenn das Fahrzeug zu hoch ist, um mit einem Schritt einzusteigen, kann eine zusätzliche Trittstufe eine Lösung sein.

Elektrische Trittstufe:

Die elektrische Trittstufe wird per Knopfdruck oder durch einen Türkontaktschalter aus- bzw. eingefahren. Sie ist in verschiedenen Breiten oder je nach Fahrzeug auch als besonders flache Ausführung erhältlich. Entscheiden Sie sich für maximalen Komfort.



Personenbeförderung



Mechanisch ausfahrbare Trittstufe:

Der Öffnungsmechanismus der mechanisch ausfahrbaren Trittstufe wird an der Schiebetür befestigt. Beim Öffnen und Schließen der Tür fährt sie automatisch ein bzw. aus. Auch die mechanisch ausfahrbare Trittstufe ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich.

Manuell ausklappbare Trittstufe:

Die manuell ausklappbare Trittstufe kann einfach per Hand ein- und ausgeklappt werden.



Rollstuhlhaltesysteme

Auf einen Blick

- ✓ Zur Sicherung von Rollstühlen und -fahrern
- ✓ Sicher und flexibel
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Geprüft nach ISO

Gute Rollstuhlhaltesysteme müssen nicht nur sicher sondern auch flexibel sein.

Sie können auswählen, ob Sie den Rollstuhl mit Karabinern, Haken oder Schlaufen befestigen möchten. Zu jedem Rollstuhlhaltesystem wird ein (höhenverstellbarer) Schulter-schräggurt verbaut.

Das Rollstuhlhaltesystem kann auf Raster-schienen oder Bodenpilzen fixiert werden. Diese können – je nach Fahrzeugmodell – nach Ihren Wünschen platziert werden.



Für eine lange Lebensdauer ist die Mechanik der Gurte der Retraktoren durch stabile Gehäuse geschützt.



Haken



Schlaufen



Karabiner



Auffahrrampen

Auf einen Blick

- ✓ Rutschfeste Lauffläche
- ✓ Diverse Größen
- ✓ Keine lästigen Klappergeräusche
- ✓ Leicht und gleichzeitig robust
- ✓ Für alle Fahrzeugtypen erhältlich

Unsere Auffahrrampen sind eine kostengünstige Lösung, um mit dem Rollstuhl sicher ins und aus dem Fahrzeug zu gelangen.

Fest montiert im Fahrzeugheck, oder bei ausreichenden Platzverhältnissen an der seitlichen Schiebetür, sind die Auffahrrampen durch Gasdruckfeder-Technologie mit geringem Kraftaufwand zu bedienen. Sie sind entweder mit einem Anti-Rutsch-Belag beschichtet oder haben eine Lochstanzung, bzw. ein Steckgitter. Durch diese können Schnee und Regenwasser schnell ablaufen.



Personenbeförderung



Bei längeren Rampen können optional erhältliche Stützfüße für zusätzliche Stabilität sorgen. Integrierte Gummidämpfer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche während der Fahrt. Die rein mechanische Bauart und die stabilen Scharniere garantieren eine lange Lebensdauer.

Wir bieten eine breite Auswahl an Rampen in unterschiedlichen Längen und Breiten. Optional sind einige Modelle auch als zweiteilige oder drehbare Variante erhältlich.



Auffahrschienen


Auf einen Blick

- ✓ Rutschfeste Fläche
- ✓ Diverse Größen verfügbar

Auffahrschienen werden als ein- oder zweiteilige Systeme angeboten und sind extrem belastbar.

Auffahrschienen Euro-Top:


Abhängig vom Fahrzeug können diese Auffahrschienen fest installiert werden.

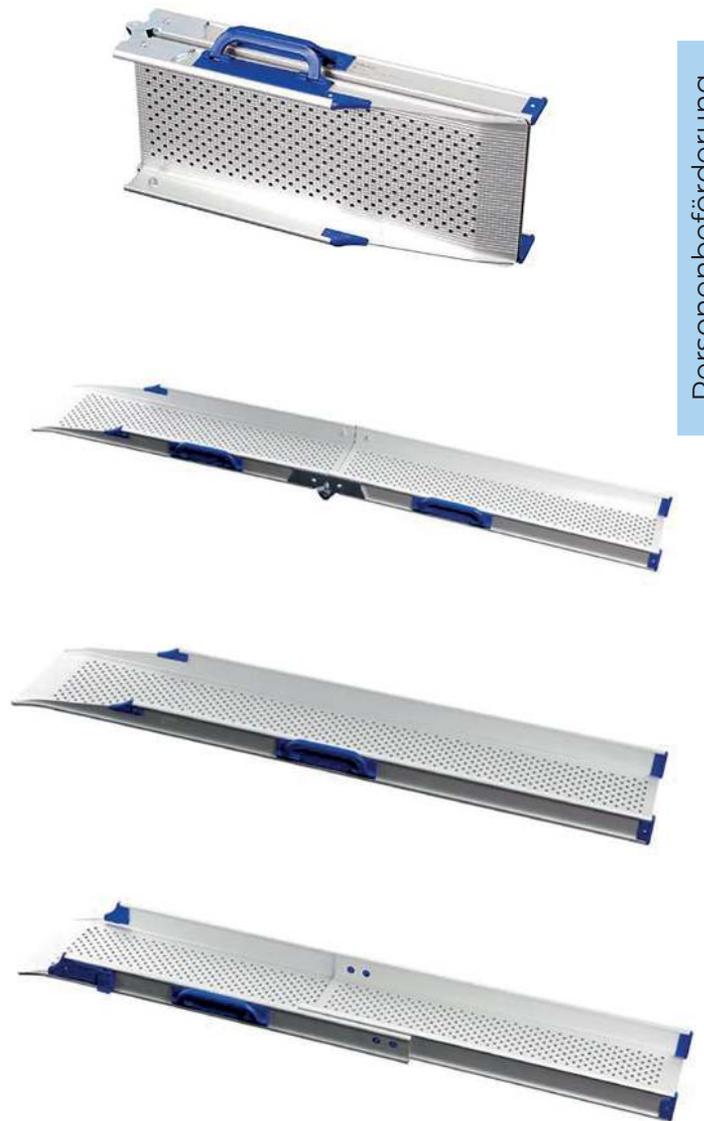

Personenbeförderung

Teleskopschienen:

Die faltbaren Teleskopschienen werden in verschiedenen Breiten und Längen angeboten und sind dadurch flexibel einsetzbar. Zusammengeklappt können sie auch in kleineren Fahrzeugen problemlos verstaut werden.

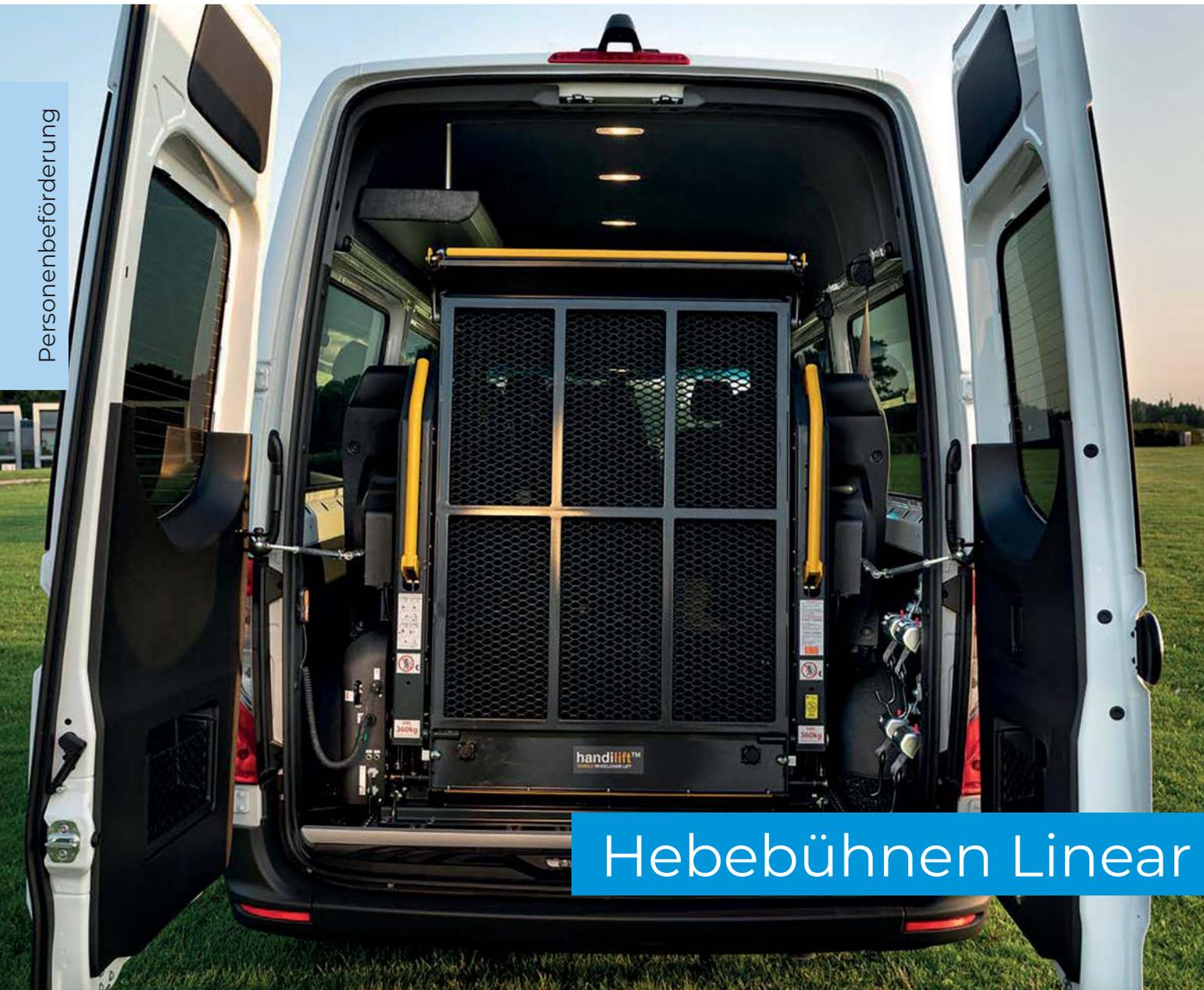

Hebebühnen Linear

Auf einen Blick

- ✓ Einfache Möglichkeit mit dem Rollstuhl ins Fahrzeug zu gelangen
- ✓ Je nach Hebebühne Montage an der Seitentür oder im Heck
- ✓ Abrollsicherung
- ✓ Für jeden Anwender das passende Modell

Mit Linear Hebebühnen können Sie einen Rollstuhl(fahrer) unkompliziert in das Fahrzeug verladen.

Platzsparend und sicher wird die Hebebühne, im Heck des Fahrzeugs montiert. Bei manchen Modellen kann ein Einbau – abhängig vom Basisfahrzeug – an der Schiebetür ebenfalls möglich sein. Die Hebebühnen sind mit unterschiedlich großen Plattformen erhältlich.



S-Serie



K-Serie

Personenbeförderung



AL1 Solid



AL1 Split

Die hintere Abrollsicherung, die Seitenschutzgeländer und die Überrollklappe bieten optimalen Schutz beim Ein- und Ausladen.

Für eine bessere Sicht nach hinten bieten wir zweiteilige Hebebühnen bzw. Hebebühnen mit Klappmechanismus an.

Technische Details

Tragfähigkeit: ca. 350 - 400 kg
 Eigengewicht: ca. 120 - 180 kg
 12 V Anlage



Schwenklift

Auf einen Blick

- ✓ Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- ✓ Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug
- ✓ Kompakte Bauweise nimmt wenig Platz im Fahrgastraum ein

Der Schwenklift lässt sich zweimal um 90° schwenken, dadurch kann er direkt vom Gehweg aus befahren werden und benötigt nur geringen Platz hinter dem Fahrzeug. Das Heben und Senken der Plattform erfolgt von der Fahrbahn abgewendeten Seite.

Dank der beiden Abrollsicherungsclappen und des Seitenschutzgeländers ist der Rollstuhlfahrer optimal gesichert. Ist der Lift zusammengeklappt, hat er eine Einbautiefe von nur ca. 30 cm und nimmt dadurch nur sehr wenig Platz im Fahrgastraum ein.



Personenbeförderung

Technische Details

Tragfähigkeit: ca. 350 kg
 Plattformgröße: ca. 840 x 1200 mm
 Hebe-/Absenkzeit: ca. 9 Sekunden
 Eigengewicht: ca. 150 kg



Unqualifizierter Krankentransport

Auf einen Blick

- ✓ Verschiedene Möglichkeiten für den Krankentransport

Der unqualifizierte Krankentransport bzw. Patientenfahrtdienst richtet sich an alle Fahrgäste, die keiner medizinischen Betreuung bedürfen, aber dennoch auf Hilfe angewiesen sind, um zum Arzt, ins Krankenhaus, nach Hause oder an ein Ziel ihrer Wahl zu gelangen. Die Begleitperson benötigt dafür keine medizinische Fachausbildung.



Personenbeförderung



Ganz nach Ihren Bedürfnissen und individuellen Vorstellungen können wir Ihr Fahrzeug mit Rampen, Tragestühlen, Fahrtragen und Dreh-/Klappsitzen ausstatten.



Wir sind für Sie da – In Deutschland und der Schweiz.

 0800 700 9 800*

 044 928 30 10

 0800 700 680

Deutschland

Standort Bad Zwischenahn

Justus-von-Liebig-Straße 7-9
26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49 (0) 4403 938 90
bz@kirchhoff-mobility.com

Standort Berlin

Scheveninger Straße 20-22
12359 Berlin
Tel. +49 (0) 30 325 984 680
berlin@kirchhoff-mobility.com

Standort Fulda

Fuldaer Straße 29
36110 Schlitz
Tel. +49 (0) 6642 919 170
schlitz@kirchhoff-mobility.com

Vertrieb Hamburg

Postfach 70 10 05
22010 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 209 479 36
hamburg@kirchhoff-mobility.com

Standort Hilden

Nikolaus-Otto-Straße 5
40721 Hilden
Tel. +49 (0) 2103 587 60
hilden@kirchhoff-mobility.com

Standort Kronau

Südendstraße 3
76709 Kronau
Tel. +49 (0) 7253 242 80
kronau@kirchhoff-mobility.com

Standort München

Morsestraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0) 89 319 08 20
muenchen@kirchhoff-mobility.com



Schweiz

Standort Zürich

Laubisrütistraße 74
CH 8712 Stäfa
Tel. +41 (0) 44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

Mit freundlicher Empfehlung von



Mitglied des
Verbandes der Fahrzeugumrüster für
mobilitätseingeschränkte Personen e.V.
und der European Mobility Group



Wir sind nach
DIN EN ISO 9001:2015
zertifiziert

 **KIRCHHOFF**
MOBILITY

www.kirchhoff-mobility.com

*Kostenlos aus dem deutschen Festnetz.
Die im Prospekt gemachten Angaben und technische Daten sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. KIRCHHOFF Mobility haftet nicht für Schreib- oder Datenübermittlungsfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im Prospekt können Bilder mit optionalen Zubehör gezeigt werden.